

基本的な使い方 ～横抱きの移動介助を補助します～

- ① ベルトの長さを調整します。
- ② 本体メッシュ布を広げて体の下に敷き、ベルトのバックルを止めます。
- ③ 介護者の頭と片腕をベルトの下に入れ、背中であすき掛けになるようにして、背中全体を起こすように抱き上げます。
- ④ 使用後は水洗いし、吊るして陰干しします。
- ⑤ 両端を持って引くと簡単に折りたたみ、コンパクトに収納できます。


ちよい楽ばんどメッシュ Q & A

Q 体重は何キロぐらいまで使えますか？

A 40kgまでを想定していますが、製品各所100kg以上（縫製部は200kg以上）、またメッシュ布についても十分な引っ張り強度を確認しています。（徳島県立工業技術センターで試験）

Q 子どもから大人まで使えますか？

A 本体は長さ100cm、幅70cmで、子供から大人まで使用できます。ベルトの長さは、介護者の身長に合わせて調整できます。また、本体のメッシュ生地はシャワーキャリーなどに使用する素材で、体に触れる内側に滑らかな面を使用しています。

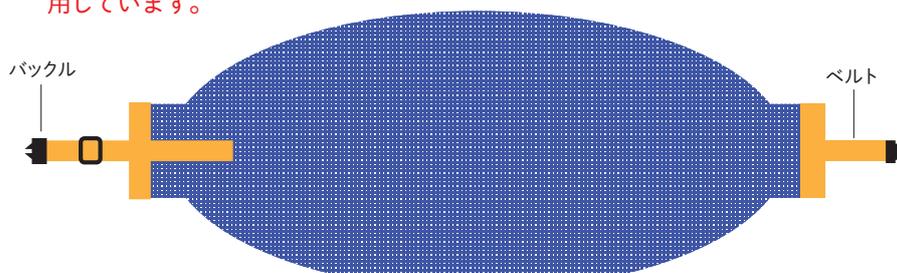

本体サイズ（長さ100cm／幅70cm）

関連商品

「ちよい楽ばんど」（携帯用移動介護補助具）



日常生活での横抱きの移動介助をサポートします。綿100%の丈夫な素材で小さく軽量（約270g）で、丸めて収納袋に入ります。携帯に便利なので、外出先など様々なシーンで活用できます。日頃の抱っこのスタイルで使える簡単仕様で、災害時の備えとしての緊急時にも役立ちます。一つ一つ安心の手作りで、オシャレな様々な色柄を揃えています。なお、小さいお子さん、小柄な介護者の方に使い勝手のいいプチサイズもあります。



「ちよい楽ばんど用 肩パット」



ちよい楽ばんどのバックル部分をカバーするものです。ブルーまたはピンクのパイピングを選べます。

【販売価格】
（税、送料別）

- ちよい楽ばんど（普通サイズ、プチサイズ）収納袋付き 9,000円
- 肩パット 500円

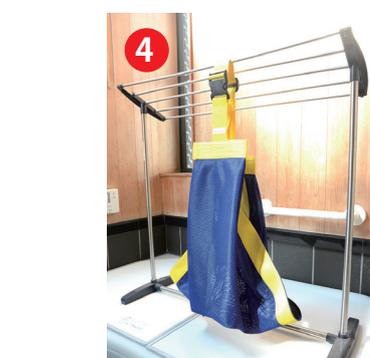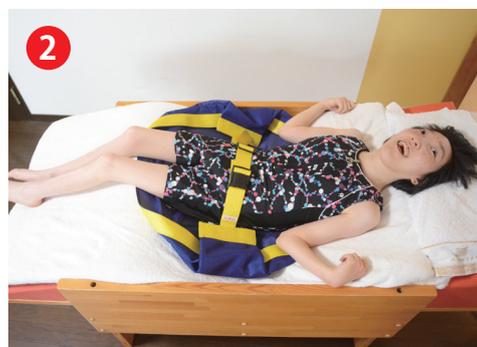

ちよい楽ばんどメッシュ

【販売価格】（税、送料別）

18,000円